

Benötigen Sie Hilfe?

Mehr Informationen erhalten Sie auf www.diabetes.ascensia.com

Ihr Messgerät ist fest auf die Anzeige der Ergebnisse in mg/dL eingestellt. Wenn Ihr Ergebnis in mmol/L angezeigt wird, wenden Sie sich an den Diabetes Service.

Vertrieb durch:
Ascensia Diabetes Care
Deutschland GmbH
51355 Leverkusen

Ascensia Diabetes Service
Telefon: 0800 7261880 (kostenfrei)
E-Mail: info@ascensia.de
www.diabetes.ascensia.de

Nur für die In-vitro-Diagnostik.

Ascensia, das „Ascensia Diabetes Care“-Logo, Contour, Microlet, das „No Coding“ (Ohne Codieren)-Logo, Second-Chance, das „Second-Chance Sampling“ (Nachfüloption)-Logo, Smartcolour und Smartlight sind Marken und/oder eingetragene Marken von Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Apple und das Apple Logo sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Die Wortmarke **Bluetooth**® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken durch Ascensia Diabetes Care erfolgt unter Lizenz.

Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Daraus ist keine Verbindung oder Billigung abzuleiten.

Contour
care
Blutzuckermesssystem

Kann mit der kostenfreien CONTOUR®DIABETES App verwendet werden.

Prüfen Sie die Verfügbarkeit der Online-Registrierung für Ihr Messgerät unter www.diabetes.ascensia.com/registration




Nachfüloption



Nur mit CONTOUR®CARE Sensoren zu verwenden.

KURZBEDIENUNGSANLEITUNG

Ihr CONTOUR®CARE Messgerät

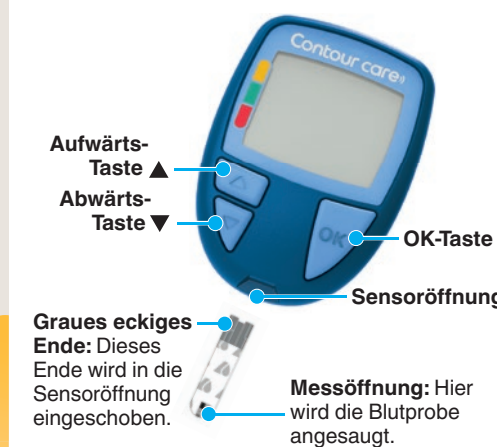

HINWEIS: Für das Messgerät sind werksseitig Zeit, Datum und Zielbereich voreingestellt. Sie können diese Werte unter **Einstellungen** ändern.

WICHTIG

Ihr CONTOUR CARE Messgerät ist nur zur Verwendung mit den CONTOUR CARE Sensoren und der CONTOUR®NEXT Kontrolllösung bestimmt.

Beachten Sie den *Verwendungszweck* und die Liste der *Wichtigen Sicherheitsinformationen*, Warnungen, Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen in der Bedienungsanleitung Ihres CONTOUR CARE Messgeräts.


1

Ein- und Ausschalten des Messgeräts

- Drücken und halten Sie die **OK**-Taste 3 Sekunden lang, bis sich Ihr Messgerät ein- bzw. ausschaltet.
- Das Messgerät wird durch Einführen des Sensors in die Sensoröffnung automatisch eingeschaltet.
- Durch Entfernen des Sensors wird das Messgerät ausgeschaltet.

Startbildschirm

Auf dem Startbildschirm stehen 2 Optionen zur Auswahl: **Tagebuch** und **Einstellungen**.

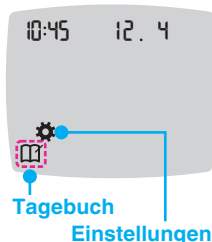

- Halten Sie die Taste **▼** gedrückt, bis die gewünschte Option blinkt.
- Um Ihre vorherigen Messwerte und Durchschnittswerte anzuzeigen, drücken Sie die **OK**-Taste, während das **Tagebuch** blinkt. Siehe *Tagebuch* und *Anzeigen von Durchschnittswerten*.
- Um Ihre Einstellungen zu ändern, drücken Sie die **OK**-Taste, während **Einstellungen** blinkt. Siehe *Einstellungen*.

Eine Tabelle der Symbole finden Sie unter *Die Anzeigen Ihres Messgeräts auf der zweiten Seite*.

HINWEIS: Ein blinkendes Symbol kann ausgewählt werden.

2

Blutentnahme aus der Fingerbeere

Ausführliche Anweisungen zur Vorbereitung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung zu Ihrer Stechhilfe.

⚠ ACHTUNG: Potenzielle Infektionsgefahr

- Waschen Sie bitte vor und nach einer Messung oder dem Anfassen des Messgeräts, der Stechhilfe sowie der Sensoren die Hände stets mit Wasser und Seife und trocknen Sie sie gut ab.
- Alle Teile dieses Sets gelten als potenziell infektiös und können u.U. infektiöse Erkrankungen übertragen.

Weitere Informationen finden Sie in der CONTOUR CARE Bedienungsanleitung.

WICHTIG


Die Stechhilfe ist für die Blutzuckerselbstkontrolle durch nur einen Patienten vorgesehen. Sie darf aufgrund der potenziellen Infektionsgefahr nur bei einer Person angewendet werden.

3

1. Bereiten Sie die Stechhilfe vor. Ausführliche Anweisungen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Stechhilfe.
2. Stecken Sie das graue eckige Ende eines neuen Sensors fest in die Sensoröffnung, bis das Messgerät einen Signalton ausgibt.



Das Messgerät schaltet sich ein und die Anzeige **Sensor an Blut führen** erscheint. Das Messgerät ist jetzt für die Messung bereit.

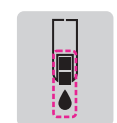

3. Verwenden Sie Ihre Stechhilfe, um einen Blutstropfen an Ihrer Fingerbeere zu gewinnen.
4. Streichen Sie von der Handfläche zum Finger in Richtung Einstichstelle, um dort einen Blutstropfen zu bilden.
5. Führen Sie die Messöffnung des Sensors umgehend an den Blutstropfen.

WICHTIG


Anweisungen zum Entfernen der Lanzette aus Ihrer Stechhilfe finden Sie in der Bedienungsanleitung der Stechhilfe.

4

Second-Chance® Sampling (Nachfüloption)

Wenn das Messgerät zwei Signaltöne ausgibt und auf der Anzeige ein blinkender Blutstropfen mit einem Pluszeichen erscheint, hat der Sensor nicht genügend Blut erhalten.

Nehmen Sie den Sensor nicht heraus. Sie haben 30 Sekunden Zeit, um von demselben Sensor mehr Blut ansaugen zu lassen.

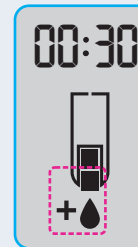

Mahlzeit-Markierungen

Wenn die Mahlzeit-Markierungen aktiviert sind, können Sie Messwerte als **Nüchtern** (Gabel), **Vor dem Essen** (Apfel) oder **Nach dem Essen** (Gabel) markieren. Siehe *Mahlzeit-Markierungen einschalten*.

smartCOLOUR® – Zielbereichsanzeige

Das Messgerät zeigt Ihr Ergebnis mit der Messeinheit, der Uhrzeit, dem Datum und der Zielbereichsanzeige an:

- ◀ Über dem Zielbereich (Gelb)
- ◀ Im Zielbereich (Grün)
- ◀ Unter dem Zielbereich (Rot)

Der Pfeil zeigt auf die Farbe, die Ihren Messwert relativ zu Ihren persönlichen Zielbereichen anzeigt: über, in oder unter dem Zielbereich.

5

Tagebuch

1. Um Ihr Messgerät einzuschalten, drücken und halten Sie 3 Sekunden lang die **OK**-Taste.

Das **Tagebuch** blinkt.

2. Um Ihre Einträge im **Tagebuch** zu betrachten, drücken Sie die **OK**-Taste.
3. Um durch das **Tagebuch** zu blättern, drücken Sie die Taste **▲** bzw. **▼**. Drücken und halten Sie die Taste **▲** bzw. **▼**, um schnell durch die Einträge zu blättern.
4. Um das **Tagebuch** zu beenden und zum **Start**-Bildschirm zurückzukehren, können Sie jederzeit die **OK**-Taste drücken.



Anzeigen von Durchschnittswerten

1. Um vom **Start**-Bildschirm aus auf das **Tagebuch** zuzugreifen, drücken Sie die **OK**-Taste, während das **Tagebuch** blinkt.
2. Um Ihre Durchschnittswerte anzuzeigen, drücken Sie die Taste **▲** im **ersten Tagebuch**-Bildschirm.



6

3. Um durch Ihre 7-, 14-, 30- und 90-Tage-Durchschnittswerte zu blättern, drücken Sie die Taste **▲**.





4. Um zu Ihren Messwerten zurückzukehren, drücken Sie die Taste **▼** auf **7 d Avg** (7-Tage-Durchschnittswert).

5. Um „Durchschnittswerte“ zu beenden und zum **Start**-Bildschirm zurückzukehren, können Sie jederzeit die **OK**-Taste drücken.

Einstellungen

Sie können folgende Einstellungen ändern:

- **Datum:** Format und Datum ändern.
- **Zeit:** Format und Zeit ändern.
- **Mahlzeit-Markierungen** (Gabel, Apfel, Gabel): Die Mahlzeit-Markierungen ein- bzw. ausschalten.
- **Bluetooth** (Blitzsymbol): Die **Bluetooth**-Funktion ein- bzw. ausschalten.
- **Zielbereiche** (Zielbereichssymbol): Die Zielbereiche anzeigen und ändern.

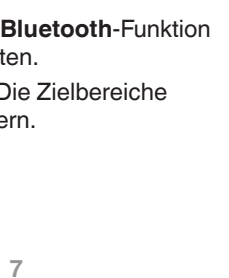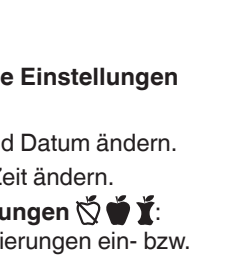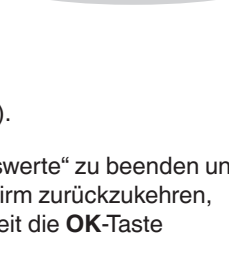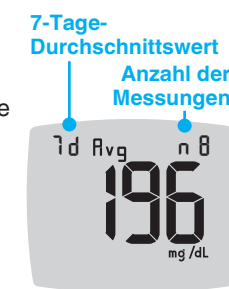


7

- **Ton** (Lautsprecher-Symbol): Den Ton ein- bzw. ausschalten.
- **Erinnerung** (Uhr-Symbol): Die Erinnerungsfunktion ein- bzw. ausschalten.

HINWEIS: Informationen zum Ändern von Uhrzeit und Datum des Messgeräts finden Sie in der Bedienungsanleitung.

So ändern Sie die Einstellungen des Messgeräts:

1. Um das Symbol **Einstellungen** (Zahnrad) im **Start**-Bildschirm auszuwählen, drücken Sie die Taste **▼**.
2. Wenn das Symbol **Einstellungen** blinkt, drücken Sie die **OK**-Taste, um zu den **Einstellungen** zu gelangen.

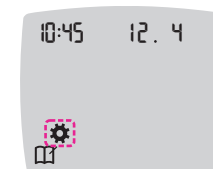

Einstellungen werden auf der zweiten Seite fortgesetzt ➔

8

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

ASCENSIA
Diabetes Care


CE
2797

© 2021 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Alle Rechte vorbehalten.

90009703
Rev. 12/21

Einstellungen (Fortsetzung)

- Um in „Einstellungen“ wie auf dem Bild dargestellt durch die Optionen zu blättern, drücken Sie die Taste ▲ bzw. ▼, bis das gewünschte Symbol **blinkt**.

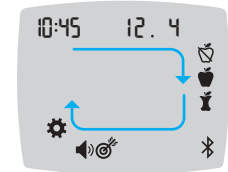

- Drücken Sie die **OK-Taste**, um das blinkende Symbol auszuwählen.
- Um eine Einstellung zu bearbeiten, drücken Sie die Taste ▲ bzw. ▼. Sie können die Einstellung ein- oder ausschalten oder aber den Wert ändern.
- Um die Änderung zu akzeptieren und wieder zum **Start-Bildschirm** zurückzukehren, drücken Sie die **OK-Taste**.

So verlassen Sie die Einstellungen und kehren zum Start-Bildschirm zurück:

- Drücken Sie die Taste ▲ bzw. ▼, bis das Symbol **Einstellungen** blinkt.
 - Drücken Sie die **OK-Taste**.
- Wenn Sie sich in einer Einstellung befinden, wie etwa „Datum“, und diese Einstellung verlassen möchten, drücken Sie die **OK-Taste** so oft, bis Sie wieder zum **Start-Bildschirm** gelangen.




Den Allgemein-Zielbereich einrichten


ACHTUNG
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über die für Sie zutreffenden Einstellungen für Blutzuckerzielbereiche.

Wenn die **Mahlzeit-Markierungen** ausgeschaltet sind, können Sie nur einen **Zielbereich** einrichten. Zum Einrichten des **Vor dem Essen-** und **Nach dem Essen-Zielbereichs** informieren Sie sich bitte in der CONTOUR CARE Bedienungsanleitung.

- Um das Symbol **Einstellungen** im **Start-Bildschirm** auszuwählen, drücken Sie die Taste ▼.
- Wenn das Symbol **Einstellungen** blinkt, drücken Sie die **OK-Taste**, um zu den **Einstellungen** zu gelangen.
- Um zum Symbol **Zielbereich** zu blättern, drücken Sie die Taste ▲ bzw. ▼. Wenn das Symbol blinkt, drücken Sie die **OK-Taste**.
- Um den blinkenden Wert für **Allgemein-Zielbereich niedrig** einzustellen, drücken Sie die Taste ▲ bzw. ▼ und anschließend die **OK-Taste**.

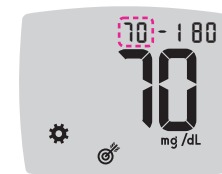


- Um den blinkenden Wert für **Allgemein-Zielbereich hoch** einzustellen, drücken Sie die Taste ▲ bzw. ▼ und anschließend die **OK-Taste**.

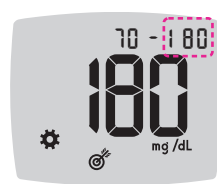

Mahlzeit-Markierungen einschalten

- Um das Symbol **Einstellungen** im **Start-Bildschirm** auszuwählen, drücken Sie die Taste ▼.
- Wenn das Symbol **Einstellungen** blinkt, drücken Sie die **OK-Taste**, um zu den **Einstellungen** zu gelangen.
- Um zu den **Mahlzeit-Markierung-Symbolen** zu blättern, drücken Sie die Taste ▲ bzw. ▼.

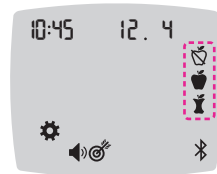

- Wenn die **Mahlzeit-Markierung-Symbole** blinken, drücken Sie die **OK-Taste**.
- Drücken Sie die Taste ▲ bzw. ▼, bis On (Ein) **blinkt** und drücken Sie dann die **OK-Taste**.




HINWEIS: Wenn **Mahlzeit-Markierungen** eingeschaltet sind, können Sie **Vor dem Essen-** und **Nach dem Essen-Zielbereiche** einrichten (siehe CONTOUR CARE Bedienungsanleitung). Außerdem können Sie eine **Erinnerung** einrichten.

Die Erinnerungsfunktion einschalten

Wenn die **Mahlzeit-Markierungen** eingeschaltet sind, können Sie eine **Erinnerung** einrichten. Nach Markierung eines Messwerts als **Vor dem Essen** werden Sie daran erinnert, nach dem Essen erneut Ihren Blutzucker zu messen. Wenn die **Mahlzeit-Markierungen** ausgeschaltet sind, informieren Sie sich unter **Mahlzeit-Markierungen einschalten** in dieser Bedienungsanleitung.

- Um das Symbol **Einstellungen** im **Start-Bildschirm** auszuwählen, drücken Sie die Taste ▼.
- Wenn das Symbol **Einstellungen** blinkt, drücken Sie die **OK-Taste**, um zu den **Einstellungen** zu gelangen.
- Um zum Symbol **Erinnerung** zu blättern, drücken Sie die Taste ▲ bzw. ▼.
- Wenn das Symbol **Erinnerung** blinkt, drücken Sie die **OK-Taste**.
- Drücken Sie die Taste ▲ bzw. ▼, bis On (Ein) **blinkt**, und drücken Sie dann die **OK-Taste**.

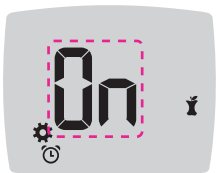


Eine Mahlzeit-Markierung nach der Blutzuckermessung auswählen

Symbole für die Mahlzeit-Markierungen

Nüchtern Nach dem Essen
Vor dem Essen Keine Markierung

HINWEIS: Sie müssen eine Blutzuckermessung durchführen, bevor Sie eine **Mahlzeit-Markierung** auswählen können. **Die Auswahl einer Mahlzeit-Markierung in „Einstellungen“ ist nicht möglich.**

- Messen Sie Ihren Blutzucker. Siehe **Blutentnahme aus der Fingerbeere** in dieser Bedienungsanleitung.
- Entfernen Sie den Sensor erst, wenn Sie eine **Mahlzeit-Markierung** ausgewählt haben.

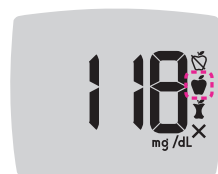

Eine **Mahlzeit-Markierung** blinkt auf dem Bildschirm mit dem Blutzucker-Messergebnis.


- Wenn die blinkende **Mahlzeit-Markierung** die gewünschte ist, drücken Sie die **OK-Taste**.

- Um eine andere **Mahlzeit-Markierung** auszuwählen, drücken Sie die Taste ▲ bzw. ▼.
- Wenn die gewünschte **Mahlzeit-Markierung** **blinkt**, drücken Sie die **OK-Taste**.


HINWEIS: Wenn Sie nicht innerhalb von 3 Minuten eine **Mahlzeit-Markierung** auswählen, schaltet sich das Messgerät aus. Ihr Blutzuckermesswert wird im **Tagebuch** ohne **Mahlzeit-Markierung** abgelegt.

Einrichten einer Erinnerung

- Stellen Sie sicher, dass die **Erinnerungsfunktion** unter **Einstellungen** eingeschaltet ist.
- Markieren Sie einen Blutzuckermesswert als **Vor dem Essen** und drücken Sie die **OK-Taste**.
- Um in halbstündigen Intervallen von 2 Stunden bis 0,5 Stunden zu blättern, drücken Sie die Taste ▲ bzw. ▼.
- Um die **Erinnerung** einzurichten, drücken Sie die **OK-Taste**.

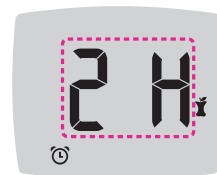

Auf dem Bildschirm wird wieder der Messwert für **Vor dem Essen** angezeigt. Das Symbol **Erinnerung** wird angezeigt, um zu bestätigen, dass die Erinnerung eingestellt ist.

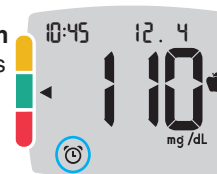

LO (Niedrig)-Ergebnisse


Wenn Ihr Blutzuckermesswert unter 10 mg/dL liegt, erscheint auf dem Bildschirm **LO** (Niedrig) und es werden 2 Signaltöne ausgegeben.



Befolgen Sie sofort die Anweisungen Ihres Arztes. Bitte kontaktieren Sie Ihren Arzt.

HI (Hoch)-Ergebnisse

Wenn das Messgerät einen Signalton ausgibt und den Bildschirm **HI** (Hoch) anzeigt, liegt Ihr Blutzuckermesswert über 600 mg/dL.

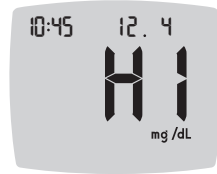

- Waschen und trocknen Sie sich gründlich die Hände.
- Wiederholen Sie die Messung mit einem neuen Sensor.

Wenn das Ergebnis immer noch über 600 mg/dL liegt, **befolgen Sie sofort die Anweisungen Ihres Arztes.**

Um das Messgerät auszuschalten, entfernen Sie den Sensor.

Die Anzeigen Ihres Messgeräts

Symbol	Legende
	Ihr Tagebuch
	Messgerät-Einstellungen
	Zielbereich oder Einstellung für einen Zielbereich
	Blutzucker-Messergebnis liegt über dem Zielbereich
	Blutzucker-Messergebnis liegt im Zielbereich
	Blutzucker-Messergebnis liegt unter dem Zielbereich

Symbol	Legende
	Mahlzeit-Markierung für Nüchtern ; für Messungen im nüchternen Zustand (Sie haben 8 Stunden lang weder gegessen noch getrunken, außer Wasser oder kalorienfreie Getränke)
	Mahlzeit-Markierung für Vor dem Essen ; für Messungen innerhalb von 1 Stunde vor einer Mahlzeit
	Mahlzeit-Markierung für Nach dem Essen ; für Messungen innerhalb von 2 Stunden nach dem ersten Bissen einer Mahlzeit
	Keine Mahlzeit-Markierung ausgewählt
	Erinnerungsfunktion
	Signalton

Symbol	Legende
	Bedeutet, dass die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist; das Messgerät kann mit einem mobilen Gerät kommunizieren
	Zeigt einen Messgerätefehler an
	Batterien sind schwach und müssen ausgewechselt werden
	7-, 14-, 30- und 90-Tage-Durchschnittswerte
	Gesamtzahl der Blutzuckermesswerte, aus denen die Durchschnittswerte errechnet werden
	Ergebnis mit Kontrolllösung
	Mehr Blut von demselben Sensor ansaugen lassen

Mithilfe der CONTOUR DIABETES App können Sie die Messergebnisse von Ihrem Messgerät auf ein kompatibles Smartphone oder Tablet übertragen. Anweisungen und Informationen zu den Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Messgeräts.