

Contour
Evolving with you

Einfach. Gut.

Das CONTOUR®CARE
Blutzuckermesssystem



Kurz-
Schulungsfolder



ASCENSIA
Diabetes Care

Mit CONTOUR®CARE in 5 einfachen Schritten den Blutzucker messen.¹



1

Hände waschen und gut abtrocknen.



2

Sensor einstecken, das Messgerät schaltet sich ein.



3

Mit der Stechhilfe einen Blutstropfen gewinnen.



4

Blut ansaugen.

Praktisch: Wenn die erste Blutprobe zu gering ist, erscheint ein Countdown im Display und es kann innerhalb von 30 Sekunden mehr Blut in den selben Sensor angesaugt werden.



5

Ergebnis ablesen, Zielbereichsanzeige beachten.



Das CONTOUR®CARE Blutzuckermesssystem ist sofort messbereit.^{*1}

Mit smartCOLOUR™ den Wert auf einen Blick einordnen.

Die 3-farbige smartCOLOUR™ Zielbereichsanzeige am Messgerät gibt Ihnen zu jedem Messwert direktes Feedback. So können Sie den Wert sofort richtig einordnen und entsprechend reagieren.**




Eine farbige Zielbereichsanzeige kann Menschen mit Diabetes dabei unterstützen, ihre HbA_{1c}-Zielwerte zu erreichen.²



Pfeil auf **gelb**:
Der gemessene Wert ist über dem Zielbereich



Pfeil auf **grün**:
Der gemessene Wert liegt im Zielbereich

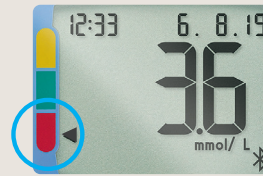

Pfeil auf **rot**:
Der gemessene Wert ist unter dem Zielbereich

Contour
care[®]

* Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung und alle im Messgeräteset enthaltenen Informationen vollständig durch, bevor Sie die erste Messung durchführen.

** Die Zielbereiche sind individuell am Messgerät einstellbar. Bitte besprechen Sie Ihre persönlichen Zielbereiche mit Ihrem Arzt.

1 CONTOUR[®]CARE BGMS User Guide, October 2018.

2 Grady M et al. J Diabetes Sci Technol. 2018;12:1211–1219.

ASCENSIA
Diabetes Care

CONTOUR®CARE schnell und einfach mit der CONTOUR®DIABETES App verbinden.¹

Öffnen Sie die CONTOUR®DIABETES App und wählen Sie unter **„Einstellungen“** den Menüpunkt **„Meine Geräte“** aus. Klicken Sie oben rechts auf das **„+“ Symbol** und folgen Sie einfach den weiteren Anweisungen in der App. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth (📶) eingeschaltet ist.



Hier finden Sie die
Seriennummer

Hier finden Sie den
Passcode

Wir kümmern uns um Ihre Fragen.

Ascensia Diabetes Service:
0800 / 50 88 822 (kostenfrei)
info@ascensia.de
www.diabetes.ascensia.de



Jetzt kostenfrei laden:
CONTOUR®DIABETES
App

