

# Ihr Blutzuckertagebuch an medizinisches Fachpersonal versenden

Mit der CONTOUR®DIABETES App haben Sie die Möglichkeit, Ihre Blutzuckerwerte vor Ihrem Termin an Ihren Arzt zu senden oder Ihre Messergebnisse am Tag Ihres Termins gemeinsam in der App anzuschauen.



**1** Tippen Sie auf das **Hauptmenü**-Symbol oben links.

**2** Im Hauptmenü tippen Sie auf **Mein Profil**.

**3** Tippen Sie nun auf **Berichte**.

**6** Der Bericht wird auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt. Um den Bericht zu versenden, tippen Sie auf das **Versenden**-Symbol.

Bitte senden Sie es an:



**5** Tippen Sie auf das Feld **vollständiger Name** und geben dort Ihren Namen ein. Wählen Sie den von Ihrem Arzt empfohlenen Zeitraum und tippen Sie auf **Tagebuch anzeigen**.

**4** Wählen Sie das **Blutzuckertagebuch (PDF)** aus.

*Ihr medizinisches Fachpersonal kann Sie auch bitten einen der anderen Berichte zu versenden.*

Wir kümmern uns um Ihre Fragen.

**Ascensia Diabetes Service:**  
**0800 / 50 88 822** (kostenfrei)  
info@ascensia.de  
www.diabetes.ascensia.de



Mehr über die CONTOUR® Blutzuckermessgeräte und die CONTOUR®DIABETES App erfahren Sie unter: [www.diabetes.ascensia.de](http://www.diabetes.ascensia.de)

© TM see diabetes.ascensia.com

©2020 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All right reserved. Ascensia, the Ascensia Diabetes Care logo, and Contour are trademarks and/or registered trademarks of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.