


Was können Sie tun, wenn die Meldung „Kein Transmitter verbunden“ angezeigt wird?

1. VERBINDUNGSSTATUS ÜBERPRÜFEN

Smart Transmitter ist verbunden:

Die Eversense Meldung zeigt **Verbunden** an

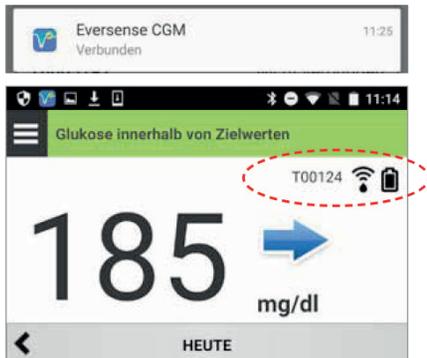

- Seriennummer des Smart Transmitters wird angezeigt
- Symbol für Sensorverbindung wird angezeigt
- Akku-Symbol wird angezeigt

Smart Transmitter ist NICHT verbunden:

Die Eversense Meldung zeigt **Kein Transmitter verbunden** an




- Seriennummer des Smart Transmitters ausgegraut
- Symbol für Sensorverbindung ist rot
- Akku-Symbol ausgegraut

2. MÖGLICHE URSACHEN ÜBERPRÜFEN

| Mögliche Ursachen | Maßnahmen |
|---|---|
| Akku des Smart Transmitters ist leer. | Smart Transmitter laden. |
| Smart Transmitter ist mit dem Ladegerät verbunden. | Smart Transmitter vom Ladegerät trennen. |
| Smart Transmitter ist ausgeschaltet. | Smart Transmitter einschalten (Ein-/Aus-Taste gedrückt halten, bis Transmitter vibriert). |
| Smart Transmitter befindet sich außerhalb der Reichweite (> 7,5 m). | Smart Transmitter und Smartphone näher zusammenbringen. |
| Bluetooth am Smartphone ist ausgeschaltet (oder Smartphone befindet sich im Flugmodus). | Bluetooth am Smartphone einschalten. |

Verbindung manuell herstellen

1. In der Eversense App auf **Menü > Verbinden** tippen.
2. In der Liste auf Ihren Smart Transmitter tippen.
3. Sicherstellen, dass der **Sichtbare Modus** des Smart Transmitters aktiv ist; dafür die Ein-/Aus- Taste dreimal drücken (LED blinkt abwechselnd grün und orange).


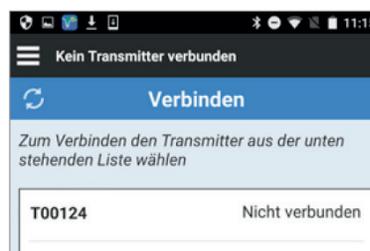


Hinweis: Die Wiederverbindung kann bis zu 1 Minute dauern.

3. BLUETOOTH-VERBINDUNG ÜBERPRÜFEN

Bluetooth erneut starten

1. Smart Transmitter ausschalten: Ein-/Aus-Taste für 5 Sekunden gedrückt halten; eine Vibration bestätigt, dass der Transmitter ausgeschaltet ist.
2. 2 Sekunden warten.
3. Ein-/Aus-Taste drei Mal drücken, um Bluetooth neu zu starten.
4. Ein-/Aus-Taste erneut drei Mal drücken, um Transmitter mit Ihrem Smartphone zu koppeln. (LED blinkt abwechselnd Grün und Orange.)
5. Auf **Menü > Verbinden** tippen, um zu prüfen, ob Ihr Smart Transmitter verbunden ist. Wenn nicht, in der Liste auf Ihren Smart Transmitter tippen.

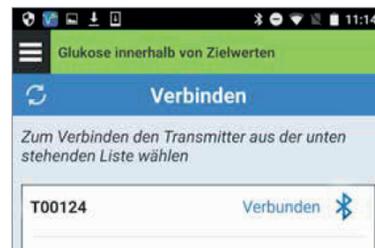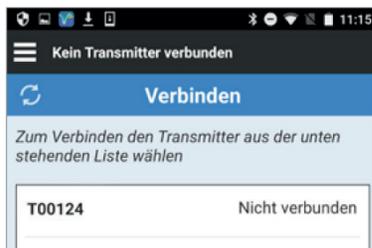


Hinweis: Die Wiederverbindung kann bis zu 1 Minute dauern.

Hat das funktioniert? Wenn nicht, führen Sie folgende Schritte durch.

Smart Transmitter trennen oder entkoppeln

1. Eversense App auf Ihrem Smartphone schließen.
2. Zu **Einstellungen > Bluetooth** gehen.
3. Es wird eine Liste der gekoppelten Geräte angezeigt.
4. Auf das Zahnrad-Symbol neben dem Namen oder der Seriennummer des Smart Transmitters tippen.
5. Auf **Entkoppeln** tippen.
6. Jetzt sollte der Smart Transmitter in der Liste verfügbarer Geräte angezeigt werden.
7. In der Eversense App auf **Menü > Verbinden** tippen.
8. Die Ein-/Aus-Taste des Smart Transmitters drei Mal drücken. (LED blinkt abwechselnd Grün und Orange.)
9. In der Liste der Anzeige **Verbinden** auf Ihren Smart Transmitter tippen.

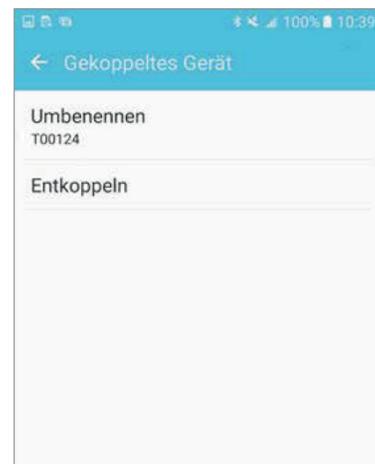

Je nach Modell Ihres Smartphones kann die Darstellung der Bildschirme geringfügig abweichen.



Je nach Betriebssystem Ihres Smartphones kann eine Bluetooth-Kopplungsbenachrichtigung oder -anforderung erscheinen. Einfach auf **Koppeln** tippen. (Das Eversense System benötigt keinen Kopplungscode oder Zugangsdaten.)



Hinweis: Die Wiederverbindung kann bis zu 1 Minute dauern.