

## Vorbereitung auf den CGM-Termin

Herzlichen Glückwunsch zu Deiner Entscheidung für das Eversense® System zur kontinuierlichen Glukosemessung.

## Vor Deinem Insertionstermin

- Lade die Eversense App aus dem Apple App Store® bzw. Google Play™ Store auf Dein kompatibles Smartphone.
- Starte die App und erstelle Dir für das optimale Nutzererlebnis ein Eversense-Konto.
  - Wähle im Begrüßungsbildschirm die Option „Ich habe keinen Smart Transmitter“.
  - Wähle die Einheit (mg/dl oder mmol/l), in der Du zukünftig mit Deinem Eversense messen wirst.

## Am Tag Deines Insertionstermins

- Trage zu Deinem Termin ein lockeres, ärmelloses oder kurzärmeliges Oberteil.
- Bringe bitte Folgendes mit:
  - Dein Smartphone, voll aufgeladen und mit installierter Eversense App.
  - Falls vorhanden: Benutzername (E-Mail-Adresse) und Kennwort für Dein Eversense-Konto.
- Um die Insertionsstelle voll ausheilen zu lassen, solltest Du es in den ersten fünf Tagen vermeiden, zu baden, zu schwimmen und anstrengende Aktivitäten zu unternehmen.
- Lies Dir vor der Verwendung des Eversense CGM-Systems die Bedienungsanleitung vollständig durch und befolge unbedingt die Anweisung Deiner Ärztin oder Deines Arztes.

## Dein Termin

Datum: \_\_\_\_\_

Uhrzeit: \_\_\_\_\_



### Eversense App

Jetzt kostenfrei laden und auf Deinen Termin vorbereiten.



## WIR SIND FÜR DICH DA.

**Telefon**  
0800 / 50 88 844  
(kostenfrei, Mo - Fr, 8 bis 18 Uhr)

**E-Mail**  
eversense.de@ascensia.com

Das Eversense® E3 Continuous Glucose Monitoring (CGM) System ist für die kontinuierliche Messung des Glukosespiegels bei Menschen mit Diabetes ab 18 Jahren für bis zu 180 Tage vorgesehen. Das System kann die Messung des Blutzuckers (BZ) an der Fingerbeere zur Entscheidungsfindung für die Diabetes-therapie ersetzen. Blutzuckermessungen an der Fingerbeere sind nach wie vor hauptsächlich für die nach Tag 21 einmal täglich durchgeführte Kalibrierung, falls die Messwerte nicht den Symptomen entsprechen oder während der Einnahme von Tetrazyklinen erforderlich. Das Einsetzen und die Entnahme des Sensors erfolgen durch einen Arzt. Das Eversense E3 CGM-System wird von einem Arzt verordnet; Patienten, die mehr darüber erfahren möchten, sollten sich an ihren Arzt wenden.

Wichtige Sicherheitsinformationen findest Du unter [global.eversenseddiabetes.com/safety-info](https://global.eversenseddiabetes.com/safety-info).

Eversense, Eversense E3 Continuous Glucose Monitoring und das Eversense Logo sind Marken von Senseonics, Incorporated. Ascensia und das „Ascensia Diabetes Care“-Logo sind Marken und/oder eingetragene Marken der Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zu Informationszwecken verwendet. Daraus ist keine Verbindung oder Billigung abzuleiten.

© 2024 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle Rechte vorbehalten.




Vertrieb durch  
Ascensia Diabetes Care Deutschland GmbH  
Marie-Curie-Straße 5  
51377 Leverkusen  
www.diabetes.ascensia.de

Hergestellt von: Senseonics, Inc.  
20451 Seneca Meadows Parkway  
Germantown, MD 20876-7005 USA

# Schritt für Schritt zu Deinem CGM fürs

**ECHTE LEBEN**

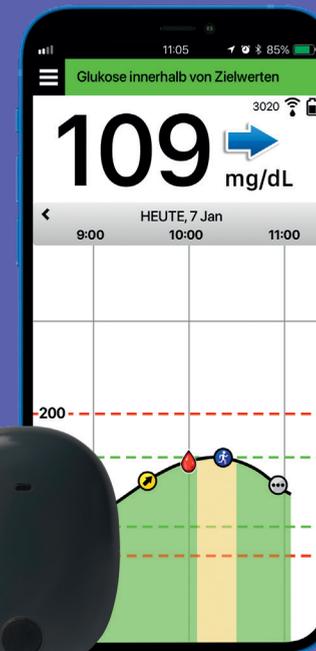

Einfach anrufen und wir machen  
den Rest: 0800 / 50 88 844

## 1. Ärztliche Verschreibung

Deine Ärztin oder Dein Arzt stellt Dir ein Rezept für das Eversense CGM-System aus.

## 2. Anrufen und entspannen

Wie das funktioniert?

Einfach den **Ascensia Diabetes Service – Eversense Team** anrufen und wir gehen mit Dir die nächsten Schritte durch, unterstützen Dich bei anstehenden Entscheidungen und übernehmen z.B. die Organisation Deiner technischen Einweisung in das System.

Unsere speziell geschulten Kolleginnen und Kollegen behalten immer den Überblick und führen Dich auf kürzestem Weg zu Deinem Insertionstermin.

**Ascensia Diabetes Service  
Eversense Team**

0800 / 50 88 844

(kostenfrei; Mo–Fr 08:00 – 18:00 Uhr)

**Folgendes erledigen wir gemeinsam mit Dir:**

### • Eversense Zentrum auswählen

Hier findest Du schon vorab eine Übersicht:



**Mein Eversense-Zentrum:**

---

### • Fachhändler aussuchen und Rezept einlösen

Dein Rezept muss bei einem kooperierenden Diabetes-Fachhändler eingelöst werden.

Hier findest Du eine Übersicht:



**Mein Diabetes-Fachhändler:**

---

### • Bestätigung der Krankenkasse abwarten

Der gewählte Fachhändler übernimmt die Kommunikation mit Deiner Krankenkasse. Innerhalb von max. 4 Wochen sendet Dir Deine Krankenkasse die Kostenübernahmebestätigung zu.

### Was tun, wenn die Krankenkasse ablehnt?

Wir sind kontinuierlich in Gesprächen mit den Krankenkassen, um die Situation für Dich zu optimieren. Sollte es dennoch einmal nicht klappen, hilft Dir auch hier gerne unser **Eversense Team im Ascensia Diabetes Service** weiter.

### • Lieferung des Eversense CGM-Systems an Dein Zentrum

Wir informieren Deinen Diabetes-Fachhändler über Deinen Insertionstermin und das von Dir gewählte Eversense Zentrum und koordinieren für Dich die rechtzeitige Lieferung Deines neuen Eversense CGM-Systems an das Zentrum.

## 3. Technische Einweisung und Einsetzen des Sensors

Du erhältst in Deinem Eversense-Zentrum eine technische Einweisung in Dein Eversense CGM-System. Danach bekommst Du Deinen ersten Sensor eingesetzt!

Eine Checkliste für den Einsetz-Tag findest Du auf der Rückseite dieses Flyers.



## 4. Die neu gewonnene Freiheit genießen!

Solltest Du einmal Unterstützung mit Deinem neuen Eversense benötigen, kontaktiere einfach das Dir bekannte Eversense Team im Ascensia Diabetes Service und wir unterstützen Dich gerne!

**Einfach anrufen und wir machen den Rest: 0800 / 50 88 844**