

Contour
Evolving with you

Vertrauen Sie für Ihr Diabetesmanagement auf **CONTOUR®NEXT**



**Kurz-
Schulungsfolder**


ASCENSIA
Diabetes Care

Blutzuckermessen in 5 einfachen Schritten.*1



Hände waschen und gut abtrocknen.



Sensor einstecken, das Messgerät schaltet sich ein.

Das CONTOUR[®]NEXT verwendet ausschliesslich CONTOUR[®]NEXT Sensoren .



Mit der Stechhilfe einen Blutstropfen gewinnen.



Blut ansaugen.

Praktisch: Wenn die erste Blutprobe zu gering ist, erscheint ein Countdown am Display und es kann innerhalb von 60 Sekunden mehr Blut in denselben Sensor angesaugt werden.



Ergebnis ablesen und dabei das smartLIGHT[®] Farbsignal beachten.

Das smartLIGHT® Farbsignal für schnelleres und einfacheres Interpretieren der Messwerte.

Das smartLIGHT® Farbsignal gibt direktes Feedback zu jedem Messwert. So können Sie den Wert sofort richtig einordnen.²



Individuelle Zielbereiche
können ganz einfach im Messgerät unter „Einstellungen“ verändert werden.¹

59 mg/dl entspricht 3,3 mmol/l; 93 mg/dl entspricht 5,2 mmol/l; 231 mg/dl entspricht 12,8 mmol/l

Contour
next

* Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung und alle im Messgeräteset enthaltenen Informationen vollständig durch, bevor Sie die erste Messung durchführen.

1. CONTOUR®NEXT BGMS Bedienungsanleitung 07/21

2. Smartson online survey, Sweden 2017. 352 respondents: People with type 1 and type 2 diabetes, over 18 years old, who tested at least 4-7 times a day. Participants received free meter and tests strips. Survey funded by Ascensia Diabetes Care.

ASCENSIA
Diabetes Care

Das CONTOUR®NEXT mit der kostenfreien CONTOUR®DIABETES App verbinden.¹

Öffnen Sie die CONTOUR®DIABETES App und wählen Sie unter **“Einstellungen”** den Menüpunkt **“Meine Geräte”** aus. Klicken Sie oben rechts auf das **“+”** Symbol und folgen Sie einfach den weiteren Anweisungen in der App. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist.

Falls Ihr Messgerät ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie die **OK** Taste bis sich das Messgerät einschaltet. Drücken und halten Sie 3 Sekunden lang die **▲** Taste bis Sie das blinkende Bluetooth-Symbol (📶) sehen. Wenn sich das Messgerät im Kopplungsmodus befindet blinkt ein blaues Licht.



Hier finden Sie die Seriennummer

Hier finden Sie den Passcode

Wir kümmern uns um Ihre Fragen.

Ascensia Diabetes Service:
0800 / 50 88 822 (kostenfrei)
info@ascensia.de
www.diabetes.ascensia.de



Jetzt kostenfrei laden:
CONTOUR®DIABETES
App

